

Fabius GS в качестве потолочного аппарата

Приложение к руководству по эксплуатации

Вшейте, пожалуйста,
в папку с документацией
к аппарату!

Назначение

Этот держатель предназначен для крепления наркозного аппарата Fabius GS к потолочному блоку питания в помещениях, используемых для медицинского обслуживания.

Предусматривается использовать потолочный держатель только в помещениях; в таких передвижных сооружениях как, например, санитарные машины, вертолеты или суда, им пользоваться нельзя.

Для Вашей безопасности и безопасности Ваших пациентов

Строго соблюдайте требования руководства по эксплуатации

Обязательным условием работы и обращения с данным аппаратом является предварительное подробное ознакомление с настоящим руководством и строгое соблюдение указанных в нем требований.

Аппарат применять только по указанному назначению.

Техобслуживание

К выполнению технических работ допускаются лишь квалифицированные специалисты.

Рекомендуем заключить договор о техобслуживании и ремонте с сервисной службой DrägerService.

При техобслуживании использовать только оригинальные запасные части производства Dräger.

Ответственность за эксплуатацию или повреждения

Ответственность за эксплуатацию аппарата ложится на владельца или пользователя во всех случаях, когда к техобслуживанию и ремонту аппарата были допущены неквалифицированные лица, не являющиеся сотрудниками DrägerService, или же при использовании аппарата не по назначению.

Фирма Dräger не несет материальной ответственности за ущерб, вызванный несоблюдением данных указаний.

Настоящие указания не являются дополнением к гарантийным обязательствам и положениям об ответственности фирмы Dräger, содержащимся в условиях продаж и поставок.

Dräger Medical AG & Co. KGaA

Fabius GS в качестве потолочного аппарата

Особенности аппарата

Аппарат для ввода в наркоз Fabius GS может использоваться в качестве потолочного аппарата в сочетании с потолочными блоками питания DVE 603X или DVE 808X.

Аппарат Fabius GS можно присоединить к потолочным блокам питания с помощью крепежного приспособления "М" и относящегося к нему устройства управления для его поднятия.

Присоединение аппарата Fabius GS к блоку DVE

- Для устройства Movita 603X: см. руководство по эксплуатации устройства Movita 600X/603X (инвент. №: 9037479), раздел "Присоединение аппарата Julian или тележки Mova Cart". Присоединение аппарата Fabius GS выполняется идентично.
- Для блока DVE 808X: см. руководство по эксплуатации блока питания DVE 8080/8081/8082 (-С/-М), инвент. №: 9029046, раздел "Julian или другие аппараты на потолочном блоке питания DVE808X-М". Присоединение аппарата Fabius GS выполняется идентично.

Уход

Протирка выполняется так же, как в случае с аппаратом Fabius GS.

Данная инструкция по применению действительна только для аппарата



**Fabius GS в качестве
потолочного аппарата**

с заводским номером:

Если фирмой Dräger не был внесен в инструкцию заводской номер, то данная инструкция по применению информирует пользователя без нашего ручательства!



Директивы ЕС 93/42/EWG
для медицинских приборов

Dräger Medical AG & Co. KGaA

(г. Любек, Германия)

🏠 Moisinger Allee 53 – 55

D-23542 Lübeck

☎ +49 451 8 82- 0

📠 26 80 70

FAX +49 451 8 82- 20 80

🌐 <http://www.draeger.com>

90 37 815 - ru

© Dräger Medical AG & Co. KGaA

1-е издательство - Март 2003

Право на внесение изменений оставляем за собой